

Erytrocyter partikelkoncentration

Synonymer

EPK

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan beställa tillsammans med övriga hematologibeställningar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-EPK

Metod

Metodtyp

Optik, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

10¹²/L

NPU-Kod

NPU01960

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall	
		Flickor	Pojkar
	<8 d	4,0 - 6,6	4,0 - 6,6
Kommentar	<12h ref.v. 3,9-5,5		
	8 d - <3 v	3,9 - 6,3	3,9 - 6,3
	3 v - <5 v	3,6 - 6,2	3,6 - 6,2
	5 v - <3 m	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
	3 m - <4 m	2,7 - 4,9	2,7 - 4,9
	4 m - <7 m	3,1 - 4,5	3,1 - 4,5
	7 m - <3 år	3,7 - 5,3	3,7 - 5,3
	3 år - <9 år	3,9 - 5,3	3,9 - 5,3
	9 år - <13 år	4,0 - 5,2	4,0 - 5,2
	13 år - <18 år	4,1 - 5,1	4,5 - 5,3

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall	
-------	-----------------	-------------------	--

		Kvinnor	Män
	>=18 år	3,9 - 5,2	4,2 - 5,7

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-18

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.