

Erytrocyter, volymfraktion

Synonymer

Hematokrit \ EVF \ Hb, EVF

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Kan beställas tillsammans med övriga hematologibeställningar.Utförs vanligen med cellräknare.Centrifugerad volymfraktion kan även beställas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-EVF

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalys: B-Erytrocyter, Erc-MCV, partikelräkning

Storhet

Volymfraktion

Enhet

L/L

NPU-Kod

NPU01961

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall	
		Flickor	Pojkar
	<8 d	0,450 - 0,670	0,450 - 0,670
Kommentar	<12h ref.v. 0,420-0,600		
	8 d - <3 v	0,420 - 0,660	0,420 - 0,660
	3 v - <5 v	0,390 - 0,630	0,390 - 0,630
	5 v - <3 m	0,310 - 0,550	0,310 - 0,550
	3 m - <4 m	0,280 - 0,420	0,280 - 0,420
	4 m - <7 m	0,290 - 0,410	0,290 - 0,410
	7 m - <3 år	0,330 - 0,390	0,330 - 0,390
	3 år - <9 år	0,340 - 0,400	0,340 - 0,400
	9 år - <13 år	0,350 - 0,450	0,350 - 0,450
	13 år - <18 år	0,360 - 0,460	0,370 - 0,490

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall	
		Kvinnor	Män
	>=18 år	0,350 - 0,458	0,393 - 0,501

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-18

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.