

Hemoglobin

Synonymer

Hb

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Hb

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU 28309

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall	
		Flickor	Pojkar
	<8 d	145 - 225	145 - 225
Kommentar	<12h ref.v. 135-195		
	8 d - <3 v	135 - 215	135 - 215
	3 v - <5 v	125 - 205	125 - 205
	5 v - <3 m	100 - 180	100 - 180
	3 m - <4 m	90 - 140	90 - 140
	4 m - <7 m	95 - 135	95 - 135
	7 m - <3 år	105 - 135	105 - 135
	3 år - <9 år	115 - 135	115 - 135
	9 år - <13 år	115 - 155	115 - 155
	13 år - <18 år	120 - 160	130 - 160

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall	
		Kvinnor	Män
	>=18 år	117 - 153	134 - 170

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-01-18

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvär: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.