

Hemoglobin (MCHC)

Synonymer

MCHC \ MCHC, Hemoglobin (Erc-Index)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

K₂-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Beställs gemensamt med Hb, EPK och index.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Hållbart i rumstemperatur och i kyla analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Erc-MCHC

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalys:B-Hemoglobin, B-Erytrocyter, B-Erytrocyter:entitisk vol.

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU28315

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<8 d	290 - 370
Kommentar	<12h ref.v. 300-360	
	8 d - <5 v	280 - 380
	5 v - <3 m	290 - 370
	3 m - <3 år	300 - 360
	3 år - <18 år	310 - 370

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	317 - 357

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-04-27

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.