

Glukos

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

FC-Mixture (NaFlourid/EDTA/Citrat) 5 mL (drar 3 mL). Kapillärt prov tas i Na-Flourid-K-Oxalat.

Provtagning

Venöst eller kapillärt. För bedömning av referensintervall måste fastepro prov tas.

Hantering

Provröret vänds 10 ggr (fram och åter) direkt efter provtagningen. Provet centrifugeras i 10 min enligt leverantörens anvisningar. Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Glukos

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU02192

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Barn	Åldersintervall	Referensintervall
	<1 d	1,7 - 3,4
	1 d - <2 d	2,2 - 3,4
	2 d - <4 v	2,7 - 4,5
	4 v - <18 år	3,3 - 5,6

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	>=18 år	4,2 - 6,3

Referensintervallsinformation
Referensintervallet gäller för fastepro v.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-11-07

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsva r: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.