

Kolesterol (Kolesterol+Kolesterol-estrar)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Kolesterol

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01566

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	18 år - <31 år	2,9 - 6,1
	31 år - <51 år	3,3 - 6,9
	>=51 år	3,9 - 7,8

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-03-05

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.