

Kreatinin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Centrifugeras vid 1300 - 1800 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Kreatinin

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU04998

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Kvinnor:		Män:	
Barn:	<7 dag: 30 - 90 µmol/L	Barn:	<7 dag: 30 - 90 µmol/L
	7 - 30 dag: 20 - 60 µmol/L		7 - 30 dag: 20 - 60 µmol/L
	1 mån - 3 år: 10 - 40 µmol/L		1 mån - 3 år: 10 - 40 µmol/L
	4 - 9 år: 20 - 60 µmol/L		4 - 9 år: 20 - 60 µmol/L
	10 - 17 år: 30 - 90 µmol/L		10 - 17 år: 30 - 90 µmol/L
Vuxna:	>17 år: 45 - 90 µmol/L	Vuxna:	>17 år: 60 - 105 µmol/L

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2011-09-16

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsvår: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.