

LDL-Kolesterol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.klinisk kemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-LDL-Kolesterol

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

SWE05408

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Vuxna	Åldersintervall	Referensintervall
	18 år - <31 år	1,2 - 4,3
	31 år - <51 år	1,4 - 4,7
	>=51 år	2,0 - 5,3
Referensintervallsinformation		
För behandlingsrekommendationer vid hyperlipidemi se www.lakemedelsverket.se		

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-09-18

Klinisk kemi:

Postadress:

Klinisk kemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Provsva: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.